

## Arbeitsanweisung Aufbereitung und Wiederbefüllung von Feuchttuchspendern zur Flächendesinfektion



### Reinigung und Desinfektion des Behälters

Vor der Wiederbefüllung von Feuchttuchspendern zur Flächendesinfektion ist eine gründliche desinfizierende Reinigung erforderlich:

1. Behälter vollständig entleeren
2. gründliches Abwischen der Innen- und Außenflächen sowie des Deckels mit Desinfektionstuch
3. 10 Minuten trocknen lassen



### Befüllung

1. Vliestuchrolle aus der Verpackung in den Feuchttuchspender geben.
  2. Gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung in der vom Hersteller angegebenen Menge zur gleichmäßigen Verteilung spiralförmig auf die Tuchrolle geben.
  3. Erstes Vliestuch aus der Tuchrolle und durch die Entnahmeöffnung ziehen und verwerfen.
  4. Feuchttuchspender verschließen, Deckel fest andrücken.
  5. Schutzdeckel der Entnahmeöffnung verschließen. Herausgezogenes Tuch muss vollständig umschlossen sein, um ein Austrocknen zu unterbinden.
  6. Beschriftung des Feuchttuchspenders:  
Name des Produkts  
Chargennummer:  
Einwirkzeit:  
Datum der Befüllung:  
Haltbarkeitsdatum der Befüllung ★  
Durchführende Person
  7. Desinfektionsmittel mindestens 30 Minuten durchziehen lassen.
- ★ Die Haltbarkeit der Lösung im Feuchttuchspender ist deutlich kürzer als das auf dem Originalgebinde aufgedruckte Haltbarkeitsdatum, bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers des Desinfektionsmittels (z. B. 28 Tage).



### Bitte beachten Sie folgende Hinweise des VAH:

- **Tuchspendersystem muss mit dem Desinfektionsmittel kompatibel sein.**  
Bestimmte Tuchmaterialien können bestimmte Desinfektionsmittel, inaktivieren bzw. in ihrer Wirkung schwächen. Dies kann insbesondere bei langen Standzeiten einen deutlichen Wirksamkeitsverlust des Desinfektionsmittels zur Folge haben.
- **Spender mit Desinfektionsmitteltüchern geschlossen aufbewahren.**  
Das Austrocknen aus dem Eimer herausragender Desinfektionsmitteltücher kann zum Verlust der Wirksamkeit des Desinfektionsmittels führen. Zudem ist eine Kontaminationsgefahr der Feuchttücher bei Kontakt mit kontaminierten Handschuhen möglich.